


PercuFIX

Dans la chirurgie de la main

Simplicité - Précision - Compression


Vis à compression, sécable en flexion,
extractible en per et en post-opératoire.

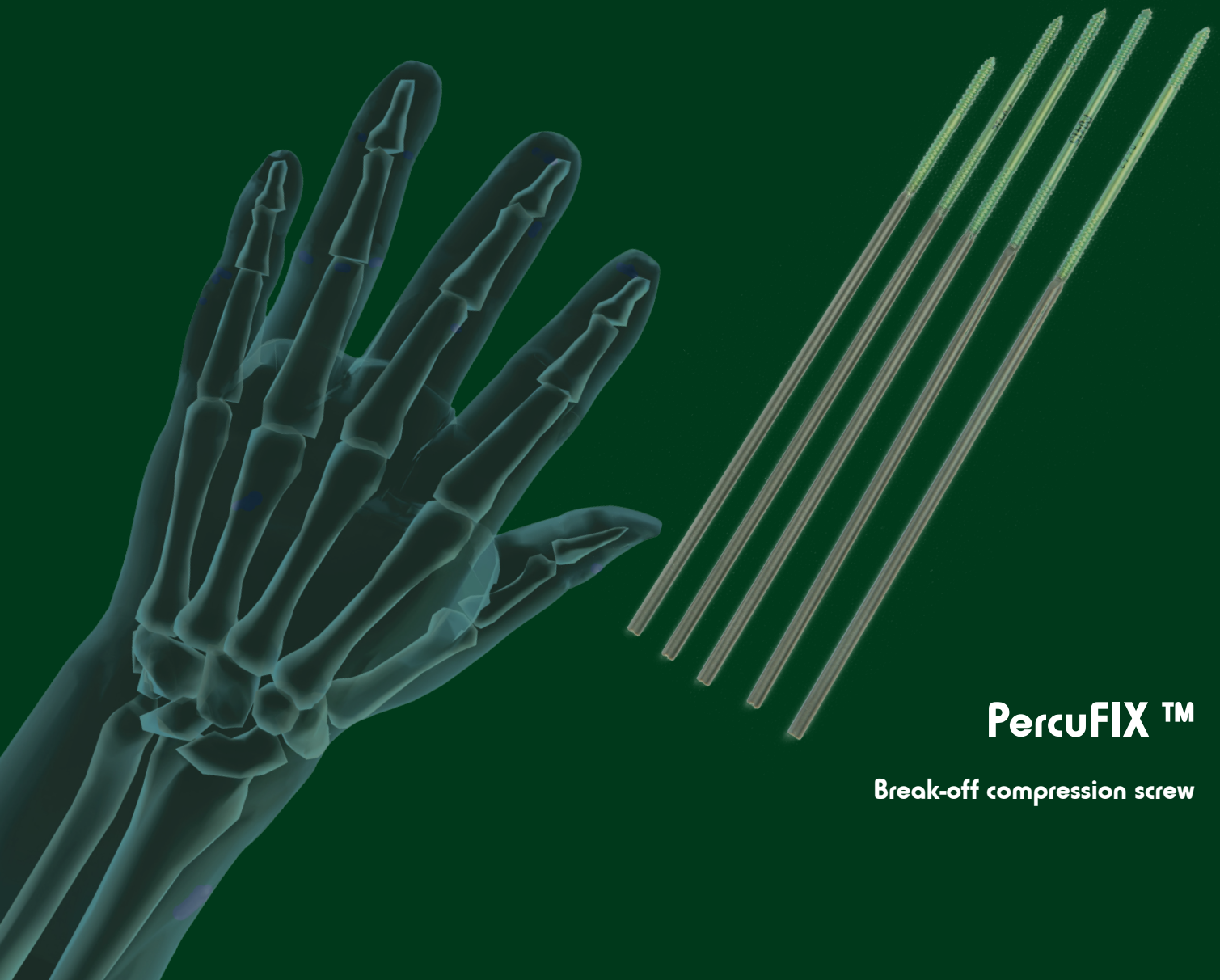

PercuFIX™

Break-off compression screw


Technique opératoire

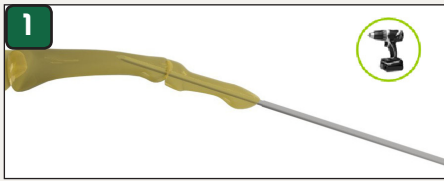


1. Après avoir avivé les surfaces articulaires, insérer la broche.




2. Lecture directe de la longueur de l'implant, puis retirer la broche.

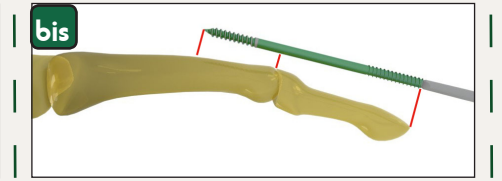


bis. Evaluer directement la longueur de vis nécessaire.

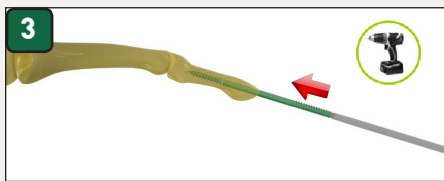

3. Mise en place de la vis à compression au moteur.

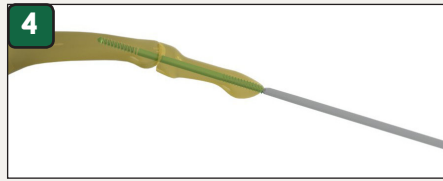


4. Vérifier le bon positionnement et la compression.

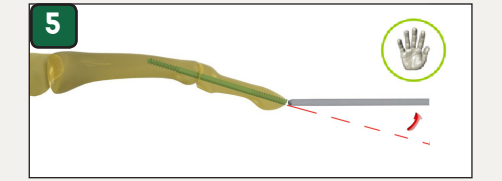

5. Ne rompre le manchon d'insertion, à la main, qu'après satisfaction.

Extraction

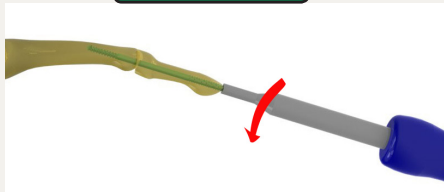

6. A l'aide d'une petite gouge, préparer l'accès à la vis :
 . Placer l'extracteur dans l'alignement de la vis, si nécessaire vérifier sous amplificateur de brillance.
 . Tourner en dévissage (à gauche), l'extracteur va se visser sur le contre filetage sur 3 mm, puis entrainer la vis en dévissage.

| Taille | Non Stérile | Stérile |
|----------------|-------------|----------|
| 1,8 mm x 10 mm | | 955-3200 |
| 1,8 mm x 12 mm | | 955-3201 |
| 1,8 mm x 14 mm | | 955-3202 |
| 1,8 mm x 16 mm | | 955-3203 |
| 1,8 mm x 18 mm | | 955-3204 |
| 1,8 mm x 20 mm | | 955-3205 |
| 1,8 mm x 22 mm | 955-3000 | 955-3206 |
| 1,8 mm x 24 mm | 955-3001 | 955-3207 |

| Taille | Non Stérile | Stérile |
|----------------|-------------|----------|
| 1,8 mm x 26 mm | 955-3002 | 955-3208 |
| 1,8 mm x 28 mm | 955-3003 | 955-3209 |
| 1,8 mm x 30 mm | 955-3004 | 955-3210 |
| 1,8 mm x 32 mm | 955-3005 | 955-3211 |
| 1,8 mm x 34 mm | 955-3006 | 955-3212 |
| 1,8 mm x 36 mm | 955-3007 | 955-3213 |
| 1,8 mm x 38 mm | 955-3008 | 955-3214 |
| 1,8 mm x 40 mm | 955-3009 | 955-3215 |

Instruments

| | |
|---------------------------|----------|
| Broche Ø 1.75/1.45-150/40 | 451-0007 |
| Jauge 5-130 | 909-1014 |

| | |
|--------------------------|----------|
| Extracteur | 961-0000 |
| Instrumentation complète | 602-3001 |

Small Bone Innovations International

ZA Les Bruyères
 01960 Péronnas - France
 Tél. +33(0) 474 21 58 19
 Fax +33 (0) 474 21 43 12
 info-intl@totalsmallbone.com

www.totalsmallbone.com

PercuFIX™

Break-off Compression Screw