

StaFIX

Varisation


Dimension <i>Dos x Patte</i>	Référence	
	<i>Droite</i>	<i>Décalée</i>
6x6	932-0000	932-0003
8x8	932-0001	932-0004
10x10	932-0002	932-0005

Réinsertion

Dimension <i>Dos x Patte</i>	Référence
	<i>Droite</i>
6x12	932-0006
8x16	932-0007
10x20	932-0008
12x24	932-0009


Instrumentation

Guide de perçage	908-0032
Broche centreuse	454-0000
Broche Ø1.5 L70mm	451-0012
Broche Ø1.8 L80mm	451-0013
Positionneur impacteur	920-0003
Impacteur	920-0004
Intrumentation complète	601-1111

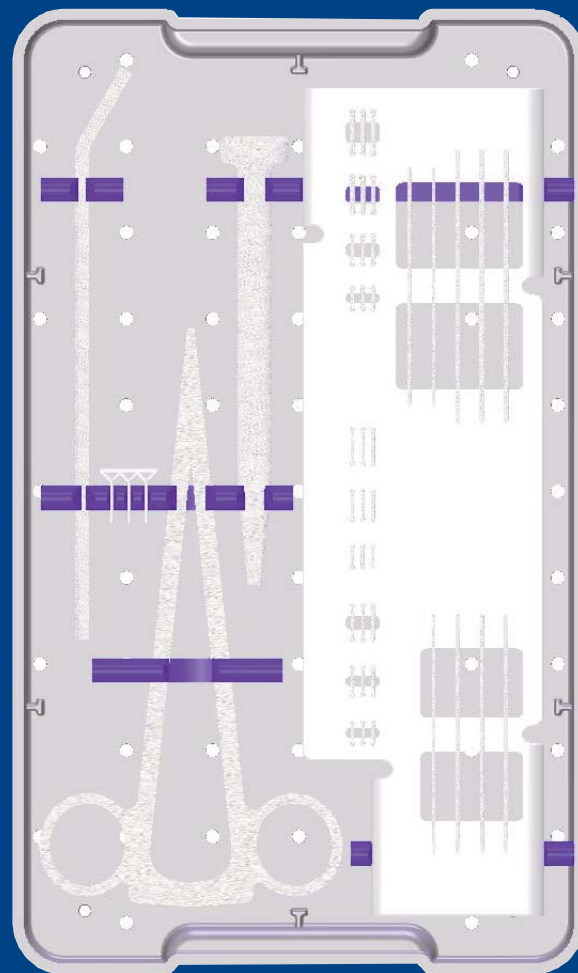

StaFIX


Stabilité de la Fixation

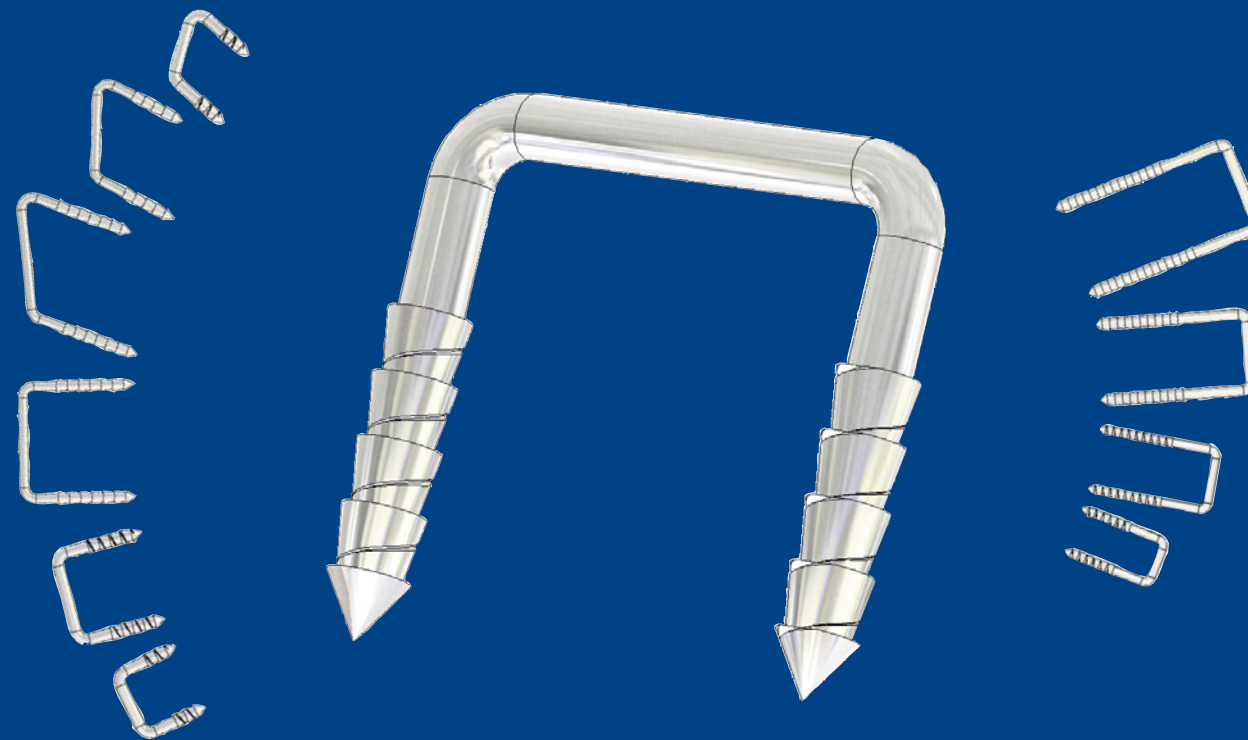


Small Bone Innovations International

ZA Les Bruyères - BP28
01960 Péronnas, FRANCE
Tel: +33(0) 474 21 58 19
Fax: +33 (0) 474 21 43 12
Mail: info-intl@totalsmallbone.com
Web: www.totalsmallbone.com




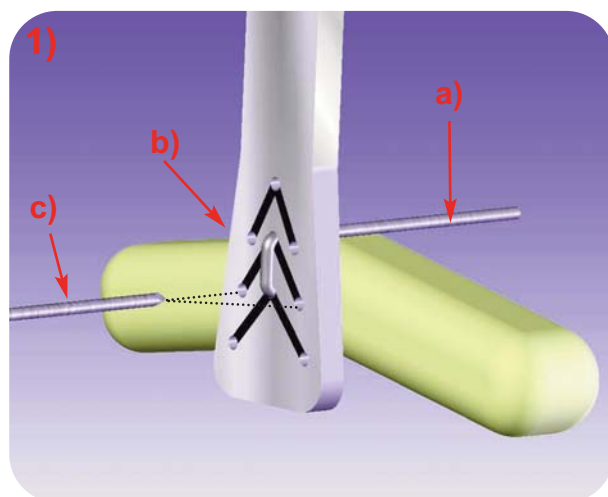

- 1) Faire l'ostéotomie de soustraction.
- Maintenir la réduction.
- a) Placer la broche centreuse (réf:454-0000) dans le trou du guide de perçage (réf: 908-0032), correspondant au dos de l'agrafe choisie.
- b) Poser la broche dans le trait d'ostéotomie.
- c) Percer au travers des trous correspondants à la broche guide, à l'aide d'une broche Ø1.5 (réf: 451-0012).

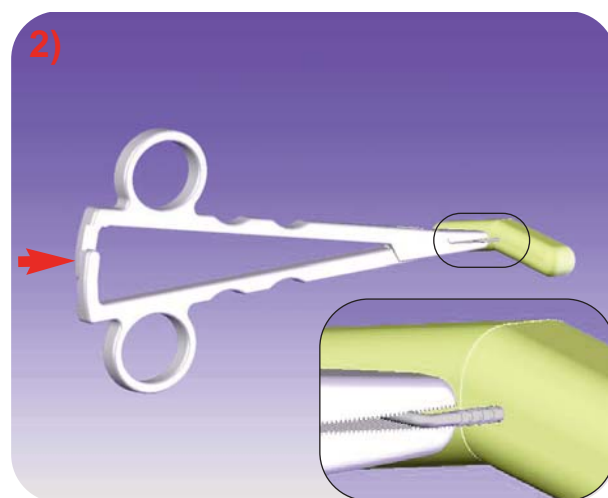


- 2) Prendre l'agrafe à l'aide du positionneur impacteur (réf: 920-0003), la présenter et effectuer une première impaction.

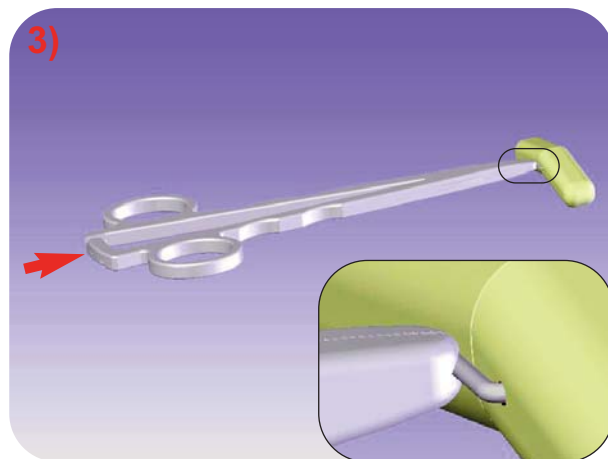


- 3) Libérer l'agrafe qui tient seule.
- Fermer le positionneur impacteur, le retourner de 90° et impacter à nouveau chaque jambe.


Pour extraire les agrafes: couper le dos, puis prendre chacune des "demi agrafes" à l'aide du positionneur impacteur et dévisser en tirant légèrement.

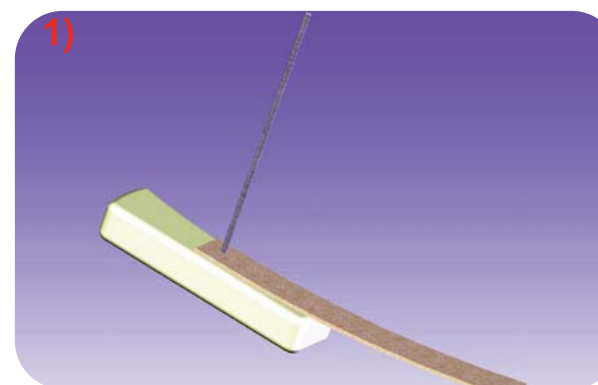


- 1) Positionner le ligament à réinsérer et le maintenir avec une broche Ø1.8 (réf: 451-0013).

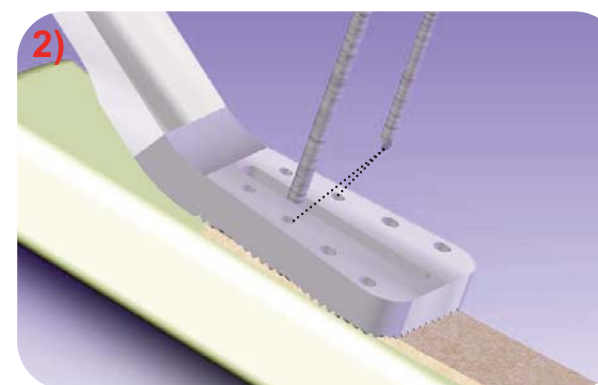


- 2) Placer le guide de perçage (réf: 908-0032) et l'orienter autour de la broche en choisissant la dimension de dos nécessaire.
- Percer à l'aide de la broche adéquate.

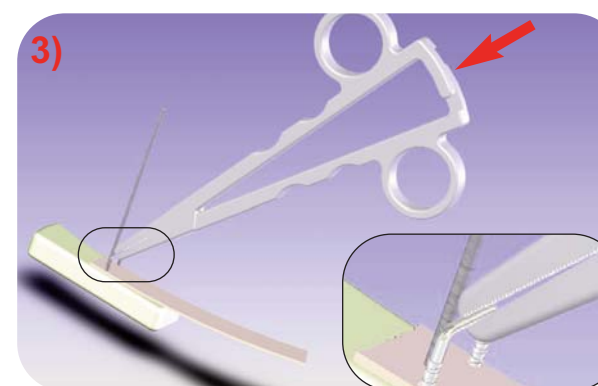

- 3) Prendre l'agrafe à l'aide du positionneur impacteur (réf: 920-0003), la présenter et effectuer une première impaction.

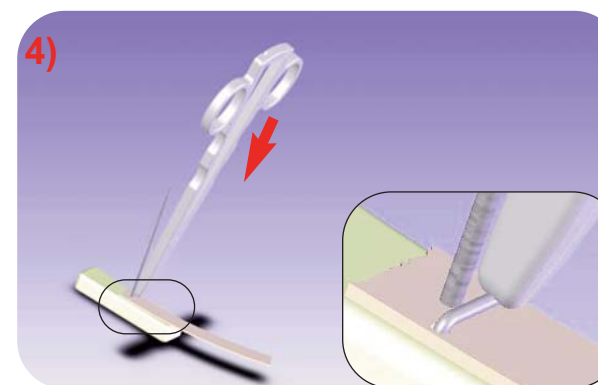

- 4) Libérer l'agrafe, qui tient seule.
- Fermer le positionneur impacteur, le faire pivoter de 90° et impacter à nouveau chaque jambe.

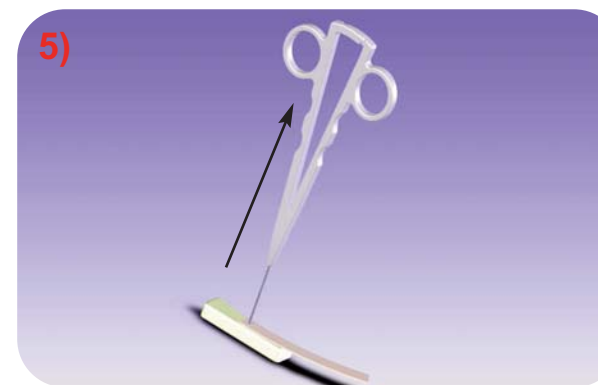

- 5) Extraire la broche à l'aide du positionneur impacteur.