

# AutoFIX

Selbstschneidende, rückwärtsdrehende und kanülierte Kompressionschraube aus Titan und Edelstahl mit Durchmesser 3,0 und 4,0




AutoFIX™ 3.0



AutoFIX™ 4.0

## OP-Anleitung

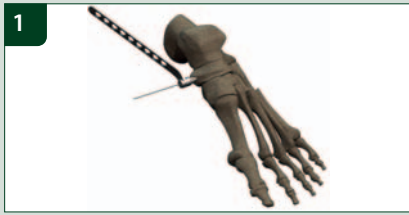

1. Führen Sie einen K-Draht Durchmesser 1,0, Länge 110 über die Bohrführung ein. Bohren Sie dann über den K-Draht bis ein Kontakt zur Gegenkortikalis besteht.



2. Benötigte Schraubenlänge am K-Draht und über die Messlehre ablesen. Addieren Sie beim Ablesen 2 mm für die nicht durchbohrte Kortikalis hinzu.



3. Präparieren Sie die erste Kortikalis mit Hilfe des Flachsenkers. Dieser ist an den Schraubendurchmesser angepasst. Achten Sie auf die richtige Größe entsprechend des Schraubendurchmessers.




4. Führen Sie die Schraube mit Hilfe des Schraubendrehers über den K-Draht ein. Entfernen Sie dann den K-Draht.

## Instrumentensatz

K-Draht $\varnothing$ 1,0 L110 mm	451-0016
0,8 mm Reinigungsstilet	929-0004
T10 Torx Aufsatz, kanüliert	901-0011
T10 Torx Aufsatz	901-0012
Flachsenker für AutoFIX-Schraube $\varnothing$ 4,0	907-0012
Flachsenker für AutoFIX-Schraube $\varnothing$ 3,0	907-0013
Messlehre mit einer Tiefe von 20 - 60 mm	909-0000
Schraubenhaltezange	914-0001
Schraubendreher Handgriff	903-1006
Bohrführung	908-0020
K-Draht Hülse	602-1010

## Implantate

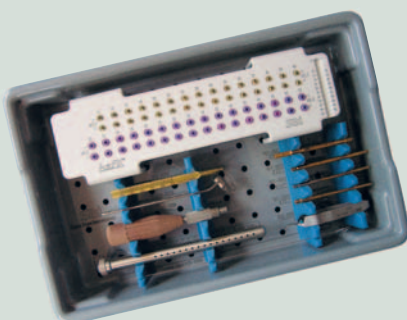

	Länge	Edelstahl	Titan
$\varnothing$ 3.0	12 mm	141-3012	241-3012
	14 mm	141-3014	241-3014
	16 mm	141-3016	241-3016
	18 mm	141-3018	241-3018
	20 mm	141-3020	241-3020
	22 mm	141-3022	241-3022
	24 mm	141-3024	241-3024
	26 mm	141-3026	241-3026
	28 mm	141-3028	241-3028
	30 mm	141-3030	241-3030
	32 mm	141-3032	241-3032
	34 mm	141-3034	241-3034
	36 mm	141-3036	241-3036

	Länge	Edelstahl	Titan
$\varnothing$ 4.0	20 mm	141-4020	241-4020
	22 mm	141-4022	241-4022
	24 mm	141-4024	241-4024
	26 mm	141-4026	241-4026
	28 mm	141-4028	241-4028
	30 mm	141-4030	241-4030
	32 mm	141-4032	241-4032
	34 mm	141-4034	241-4034
	36 mm	141-4036	241-4036
	38 mm	141-4038	241-4038
	40 mm	141-4040	241-4040
	42 mm	141-4042	241-4042
	44 mm	141-4044	241-4044
	46 mm	141-4046	241-4046