



PercuFIX

Einfachheit – Präzision – Kompression

Die vor- und nachoperativ entfernbare
Abbruch-Kompressionsschraube

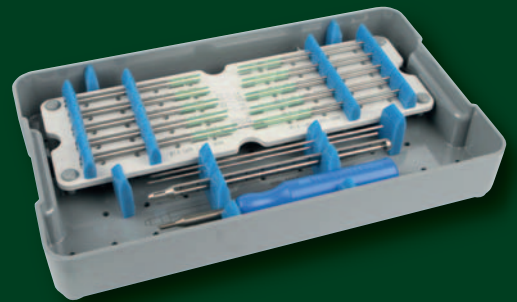


OP-Anleitung

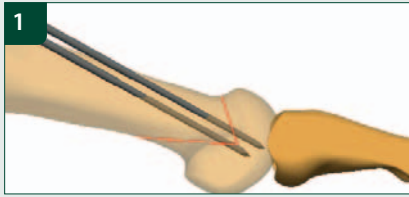


1. Bringen Sie den ersten K-Draht über die Frakturstelle oder zur Arthrodese ein.




2. Ermitteln Sie dann die notwendige Schraubenlänge mit Hilfe der Messlehre.

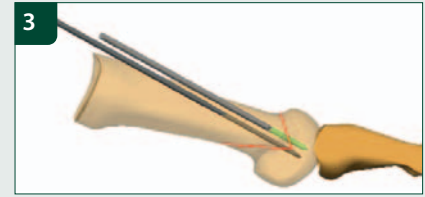


3. Bringen Sie die erste Schraube parallel zum ersten K-Draht ein, aber achten Sie darauf die axiale Ausrichtung beizubehalten. Schrauben Sie weiter bis Sie die Abbruchmulde erreichen (Farbmarkierung).

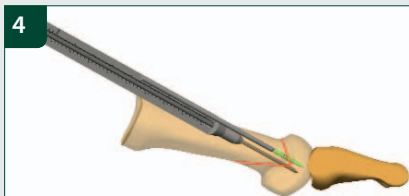


4. Ermitteln Sie die benötigte Länge der zweiten Schraube auf dieselbe Weise.

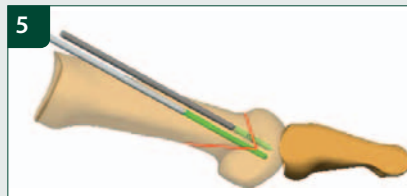

5. Montieren Sie die zweite Schraube wie zuvor dargestellt.

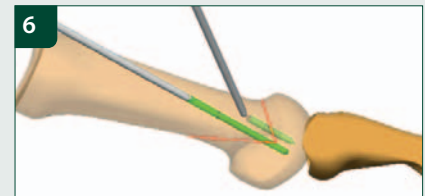

6. Prüfen Sie die Fixation bevor Sie die Schäfte abbrechen. Sollte die Fixation noch nicht den Anforderungen entsprechen, entfernen Sie die Schrauben und beginnen den Vorgang noch einmal von vorne.

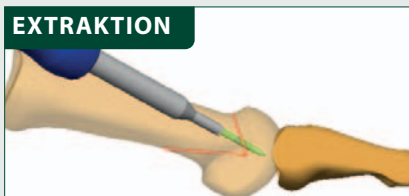

Benutzen Sie einen kleinen Hohlmeißel um den Ansatz für den Schraubenextraktor zu präparieren.

- Positionieren Sie den Extraktor in einer Linie mit der Achse der Schraube. Benutzen Sie, wenn nötig, ein Röntgengerät, um die korrekte Ausrichtung zu überprüfen.
- Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn, so dass der Extraktor am Kontergewinde der Schraube nach 3mm einrastet und anschließend die Schraube entfernt.

ACHTUNG: Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um die Schraube wieder vom Extraktor zu entfernen: Die Schraube muss entfernt werden, bevor das Instrument gereinigt wird.

Größe	nicht sterile Art.-Nr.	sterile Art.-Nr.	Größe	nicht sterile Art.-Nr.	sterile Art.-Nr.
1,8 mm x 10 mm		955-3200	1,8 mm x 26 mm	955-3002	955-3208
1,8 mm x 12 mm		955-3201	1,8 mm x 28 mm	955-3003	955-3209
1,8 mm x 14 mm		955-3202	1,8 mm x 30 mm	955-3004	955-3210
1,8 mm x 16 mm		955-3203	1,8 mm x 32 mm	955-3005	955-3211
1,8 mm x 18 mm		955-3204	1,8 mm x 34 mm	955-3006	955-3212
1,8 mm x 20 mm		955-3205	1,8 mm x 36 mm	955-3007	955-3213
1,8 mm x 22 mm	955-3000	955-3206	1,8 mm x 38 mm	955-3008	955-3214
1,8 mm x 24 mm	955-3001	955-3207	1,8 mm x 40 mm	955-3009	955-3215
Instrumente					
K-Draht ø 1.75/1.45-150/40		451-0007	Schraubenextraktor		961-0000
Messlehre 5 - 130		909-1014	Instrumenten-Set		602-3001

Small Bone Innovations International
 ZA Les Bruyères
 01960 Péronnas – France
 Tel. +33 (0) 474 21 58 19
 Fax +33 (0) 474 21 43 12
 info-intl@totalsmallbone.com
 www.totalsmallbone.com

Small Bone Innovations Deutschland GmbH
 Haldenstraße 9
 78166 Donaueschingen – Germany
 Tel. +49 (0) 771 929 10 10
 Fax +49 (0) 771 929 10 11
 csd@totalsmallbone.com

PercuFIX™
 Break-off Compression Screw